



NÁVOD K POUŽITÍ

Tato informace je určena k poučení uživatelů hydrofilních měkkých kontaktních čoček Soflens®59, jak čočky používat a jak o ně pečovat.

Platí pro:

NÁZEV PRODUKTU	MATERIÁL	OBSAH VODY	ROZTOK V BALENÍ
Kontaktní čočky Soflens®59 (hilafilcon B) s manipulačním zabarvením	Hilafilcon B	59 hmotnostních procent	Fyziologický roztok pufrovaný boritanem s poloxaminem

Popis a použití

Kontaktní čočky Soflens®59 jsou určeny k dennímu použití s dobou výměny podle doporučení očního specialisty.

Při opakovaném použití musí být čočky po vynětí a před opakovaným zavedením vyčištěny, opláchnuty a vydezinfikovány. Vždy dodržujte plán použití čoček a intervalů výměny, který vám předepsal váš oční specialista.

STERILE Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobcem určeny k opakovanému použití, podle doporučení očního specialisty. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

Pokyny k vložení a vynětí

Před manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte a osušte ruce, nepoužívejte parfémovaná mýdla a mýdla s léčivými přípravky. Vylijte čočku na dlaň. Ujistěte se, že správně vyjmouta.



Čočku před vložení prohlédněte, a pokud je poškrábaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Při vynětí čočky musíte mít čisté a suché ruce; čočku prstem posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky.

Péče o čočky

- Čištění a dezinfekce čoček mezi použitím jsou pro zdraví očí zásadní.
- Používejte pouze produkty určené k péči o měkké kontaktní čočky, podle pokynů výrobce.
- Vždy používejte čerstvé roztoky určené k péči o oční čočky, před uplynutím doby jejich použitelnosti.
- K oplachování, uchovávání či opětovnému zvlhčování čoček nepoužívejte jiné roztoky, např. vodu z vodovodu, z lahví či sliny.
- Když nejsou čočky používány, vždy je uchovávejte úplně ponořené v doporučeném roztoku.
- Vždy, když čistíte oční čočky, nezapomeňte vyčistit i pouzdro na čočky.
- Na konci plánované doby použití doporučené vaším očním specialistou vždy čočky zlikvidujte.
- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.
- Nepřipusťte, aby se vám do oka nebo na čočky dostala líčidla, pletová voda, mýdlo, krém nebo parfémované přípravky.
- Nikdy při vyjímání čoček z obalu nebo z oka nepoužívejte ostré předměty nebo nehty.

Varování a bezpečnostní opatření

Pokud nebudete dodržovat plán použití a režim čištění doporučený vašim očním specialistou, může vzniknout vyšší riziko závažné oční infekce.

Kontaktní čočky nepoužívejte, pokud máte:

- alergii, zánět, infekci nebo zarudnutí oka či okolí oka,
- suché oči (nedostatek slz),
- zdravotní potíže postihující oči, např. nachlazení nebo chřipku,
- jakékoli systémové onemocnění postihující oči.

Před použitím kontaktních čoček se obraťte na svého očního specialistu, pokud:

- provádíte vodní sporty,
- se pohybujete v nadměrně suchém či prašném prostředí,
- používáte oční léky.

Pokud u vás dojde k některému z následujících problémů, **okamžitě** čočky vyjměte:

- bodání, pálení, svědění v očích, podráždění očí či jiná bolest oka,
- nižší komfort ve srovnání s předešlým použitím,
- neobvyklý výtok z oka nebo nadměrné slzení,
- zarudnutí očí,
- výrazné nebo trvale suché oči,
- zhoršené nebo rozmazané vidění,
- duha nebo světelné kruhy okolo světel,
- citlivost na světlo.

Pokud kterýkoli z těchto příznaků přetrvává i po vynětí, vyčištění a opětovném zavedení čoček nebo po zavedení nových čoček, čočky vyjměte a **obraťte se na svého očního specialistu**. Pokud si těchto příznaků nebudete všimát, mohou vést k závažným onemocněním.

Vysvětlení symbolů na štítcích a krabičkách



Poplatky za likvidaci odpadu podle směrnice 94/62/ES



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum vydání: RRRR-MM-DD



0050 Uvádí označení shody CE a číslo notifikovaného orgánu

®/™ jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejich dceřiných společností.
© Bausch & Lomb Incorporated.

8131700