



## NÁVOD K POUŽITÍ

Tato informace je určena k poučení uživateli hydrofilních měkkých kontaktních čoček Soflens® Toric, jak čočky používat a jak o ně pečovat.

Platí pro:

NÁZEV PRODUKTU	MATERIÁL	OBSAH VODY	ROZTOK V BALENÍ
Kontaktní čočky Soflens® Toric (alphafilcon A) s manipulačním zabarvením	Alphafilcon A	66 hmotnostních procent	Britanem pufrovaný fyziologický roztok

### Popis a použití

Čočky Soflens® Toric jsou určeny k dennímu použití nebo k prodloužené době použití s intervalem mezi výmětami 1 - 7 dnů, podle doporučení očního specialisty.


Při opakovaném použití musí být čočky po vymeči a před opakovaným zavedením vyčištěny, opláchnuty a vydezinfikovány. Vždy dodržujte plán použití čoček a intervalů výměny, který vám předepsal váš oční specialista.

**STERILE** Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobkem určeny k opakovanému použití, podle doporučení očního specialisty. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

### Pokyny k vložení a vymeči

Před manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte a osušte ruce, nepoužívejte parfémovaná mýdla a mýdla s léčivými přípravky. Vylijte čočku na dlaň. Ujistěte se, že je správně vymečta.

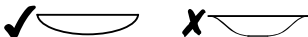

Čočku před vložením prohlédněte, a pokud je poškrábaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Při vymeči čočky musíte mít čisté a suché ruce; čočku prstem posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky.

### Péče o čočky

- Čištění a dezinfekce čoček mezi používáními jsou pro zdraví očí zásadní.
- Používejte pouze produkty určené k péči o měkké kontaktní čočky, podle pokynů výrobce.
- Vždy používejte čerstvé roztoky určené k péči o oční čočky, před uplynutím doby jejich použitelnosti.
- K oplachování, uchování či opětovnému zvlhčování čoček nepoužívejte jiné roztoky, např. vodu z vodovodu, z lahvi či sliny.
- Když nejsou čočky používány, vždy je uchovávejte úplně ponořené v doporučeném roztoku.
- Vždy, když čistíte oční čočky, nezapomenejte vyčistit i pouzdro na čočky.
- Na konci plánované doby použití doporučené vašim očním specialistou vždy čočky zlikvidujte.
- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.
- Nepřipusťte, aby se vám do oka nebo na čočky dostala lůžka, pleťová voda, mýdlo, krém nebo parfémovaná příprava.
- Nikdy při vymeči čoček z obalu nebo z oka nepoužívejte ostré předměty nebo nehty.

### Varování a bezpečnostní opatření

Pokud nebudete dodržovat plán použití a režim čištění doporučený vašim očním specialistou, může vzniknout vyšší riziko závažné oční infekce.

Pokud jsou předepsány k dennímu použití, nenechávejte je zavedeny během spánku.

Kontaktní čočky nepoužívejte, pokud máte:

- alergie, zánět, infekci nebo zarudnutí oka či okolí oka,
- suché oči (nedostatek slz),
- zdravotní potíže postihující oči, např. nachlazení nebo chřipku,
- jakékoli systémové onemocnění postihující oči.

Před použitím kontaktních čoček se obraťte na svého očního specialistu, pokud:

- provádíte vodní sporty,
- se pohybujete v nadměrně suchém či prašném prostředí,
- používáte oční léky.

Pokud u vás dojde k některému z následujících problémů, **okamžitě** čočky vyjměte:

- bodání, pálení, svědění v očích, podráždění očí či jiná bolest oka,
- nižší komfort ve srovnání s předějším použitím,
- neobvyklý výtok z oka nebo nadměrné slzení,
- zarudnutí očí,
- výrazné nebo trvale suché oči,
- zhoršené nebo rozmazané vidění,
- duha nebo světelné kruhy okolo světla,
- citlivost na světlo.

Pokud kterýkoli z těchto příznaků přetrvává i po vymeči, vyčištění a opětovném zavedení čoček nebo po zavedení nových čoček, čočky vyjměte a **obraťte se na svého očního specialistu**. Pokud si těchto příznaků nebudete všimati, mohou vést k závažným onemocněním.

### Vysvětlení symbolů na štítcích a krabičkách



Poplatky za likvidaci odpadu podle směrnice 94/62/ES



Bausch & Lomb Incorporated  
1400 North Goodman Street  
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum vydání: RRRR-MM-DD



Uvádí označení shody CE a číslo notifikovaného orgánu

<sup>®/™</sup> jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejich dceřiných společností.  
© Bausch & Lomb Incorporated.

8113600